

Серафол® ABO + D

Карточка с моноклональными антителами для определения группы крови и резус-фактора у постели больного



- **Надежность** – быстрая и сильная агглютинация, ошибочные результаты исключены!
- **Удобство** – готовы к использованию, не требуют хранения в холодильнике
- **Безопасность** для персонала – высушенные реагенты
- **Гигиеничность и удобство** документирования: легко покрываются защитной плёнкой
- **Немецкое качество**

Для безопасного переливания крови Серафол® ABO + D

Серафол® AB0 + D

**Карточки с моноклональными антителами
с возможностью хранения при комнатной температуре.**

Зарегистрировано институтом Пола Эрлиха, маркировано CE

Приказы и инструкции по переливанию крови указывают на необходимость определения группы крови пациента заранее и ее подтверждение непосредственно перед переливанием. Для проведения определения у постели больного рекомендуем использование карточек Серафол®, которые подходят для A,B,0 Rh(D) типирования крови донора и реципиента. Идентификация группы крови при помощи карточки не требует больших усилий, предоставляет максимальную безопасность, гигиеничность и простоту в использовании.

**Карточки с моноклональными антителами
Серафол® AB0 + D и Серафол® AB0:**

**Готовые к использованию, сухие, окрашенные
антисыворотки**

Не требуют подготовительных процедур, возможно
прямое определение группы крови

Моноклональные реагенты

Быстрая и сильная агглютинация, не требуют
обязательного использования контрольных реагентов

Специальный стабилизатор

Карточки могут храниться непосредственно в месте
определения, при комнатной температуре.

Срок годности – 1.5 года

Легко покрываются защитной пленкой

Гигиеничность и удобство документирования

**Одномоментное определение группы крови
у донора и реципиента**

Рационально и экономично


Напишите личные данные на карточке. Поместите одну каплю 0.9% раствора NaCl и одну каплю крови в зоны определения и аутоконтроля. Определение можно проводить на капиллярной и венозной крови. В случае определения венозной крови рекомендуется использовать дозирующую пипетку.




Тщательно смешайте кровь с окрашенными высушенными антисыворотками при помощи палочки или обратной стороны пипетки. Обратите внимание! Каждое поле должно быть перемешано до образования однородной реакционной массы, при помощи чистой палочки.




Круговыми движениями карточки в течение 30 секунд добейтесь перемешивания реакционной смеси и осуществления реакции.

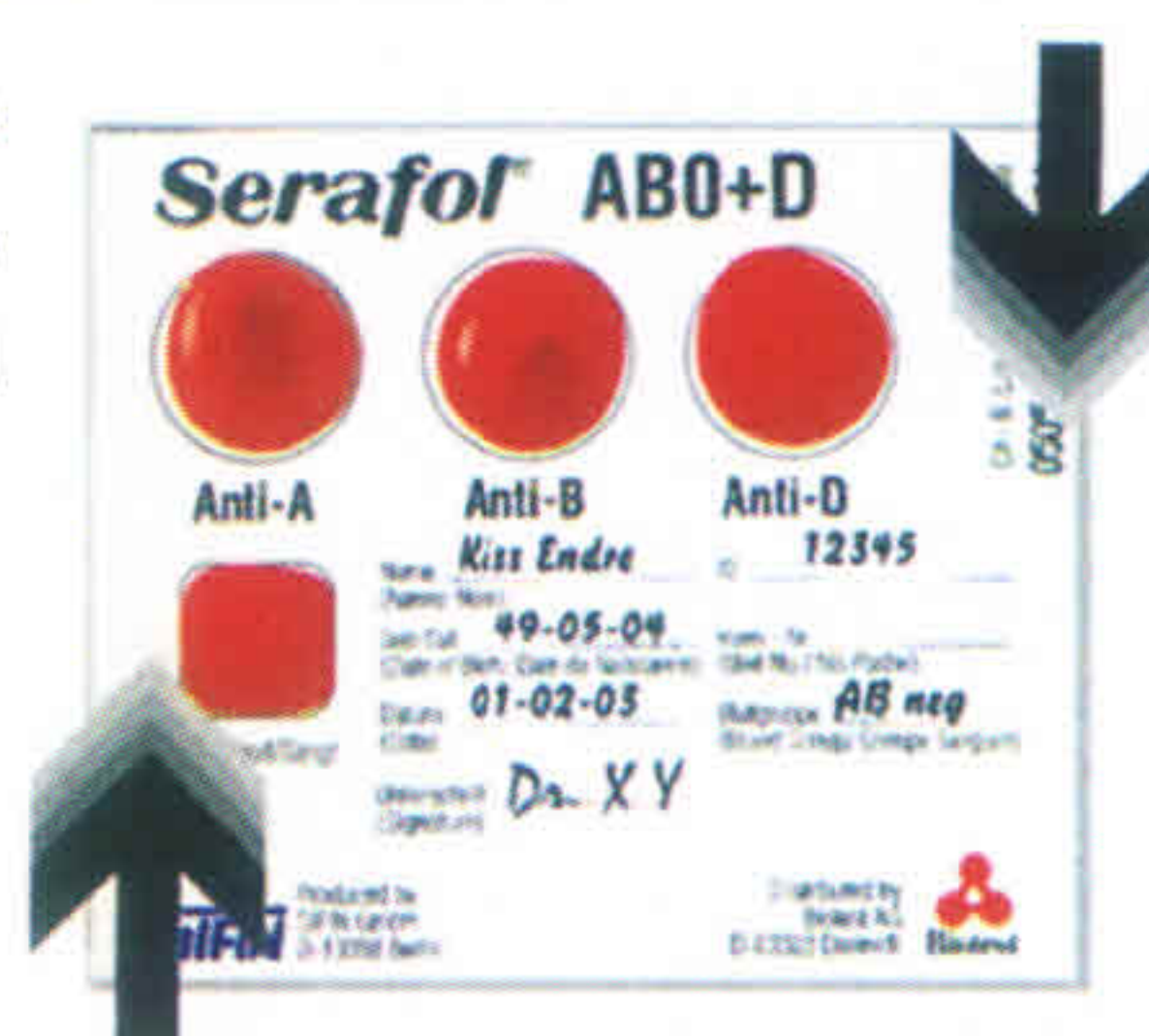

Результаты впишите в карточку. Оставьте ее при комнатной температуре до полного высыхания.

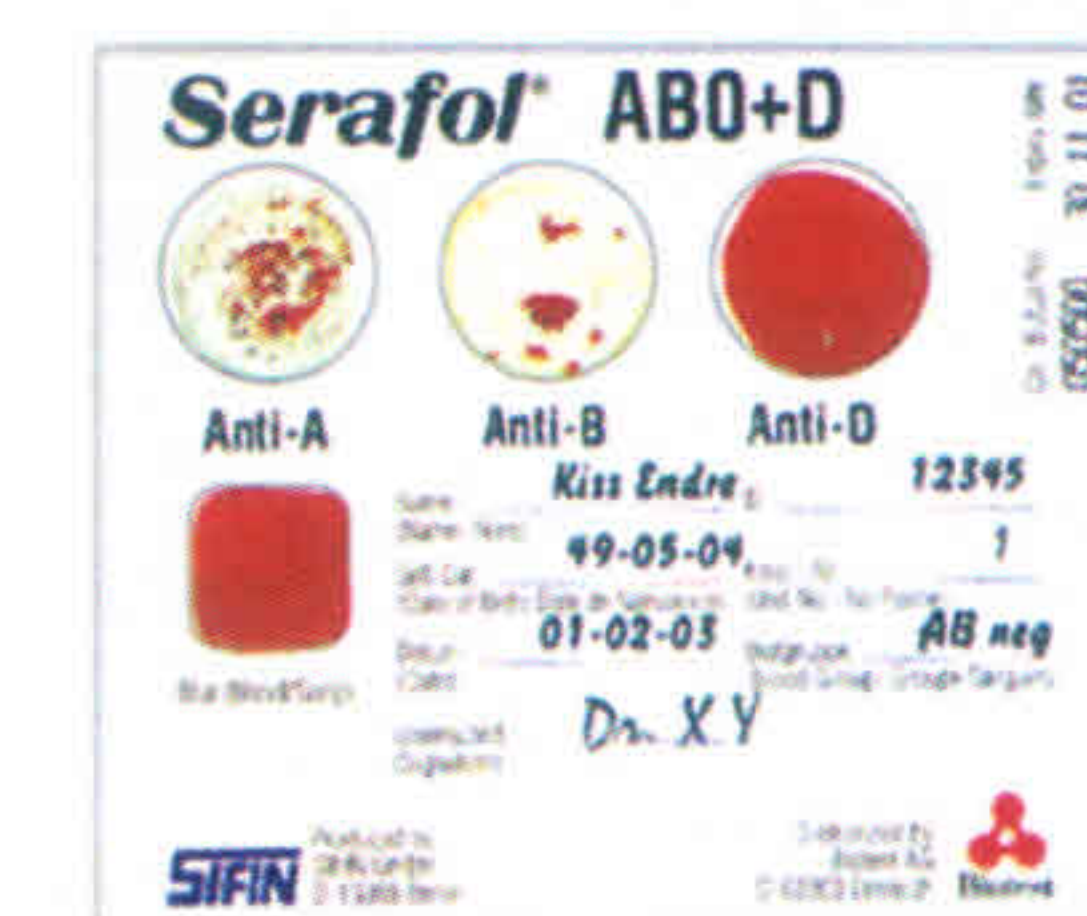

После высыхания, для адекватного и длительного хранения, накройте карточку прозрачной самоклеющейся пленкой. Таким образом, результаты могут быть прикреплены в историю болезни и будут храниться в гигиенических условиях без деконтаминации и повреждения.

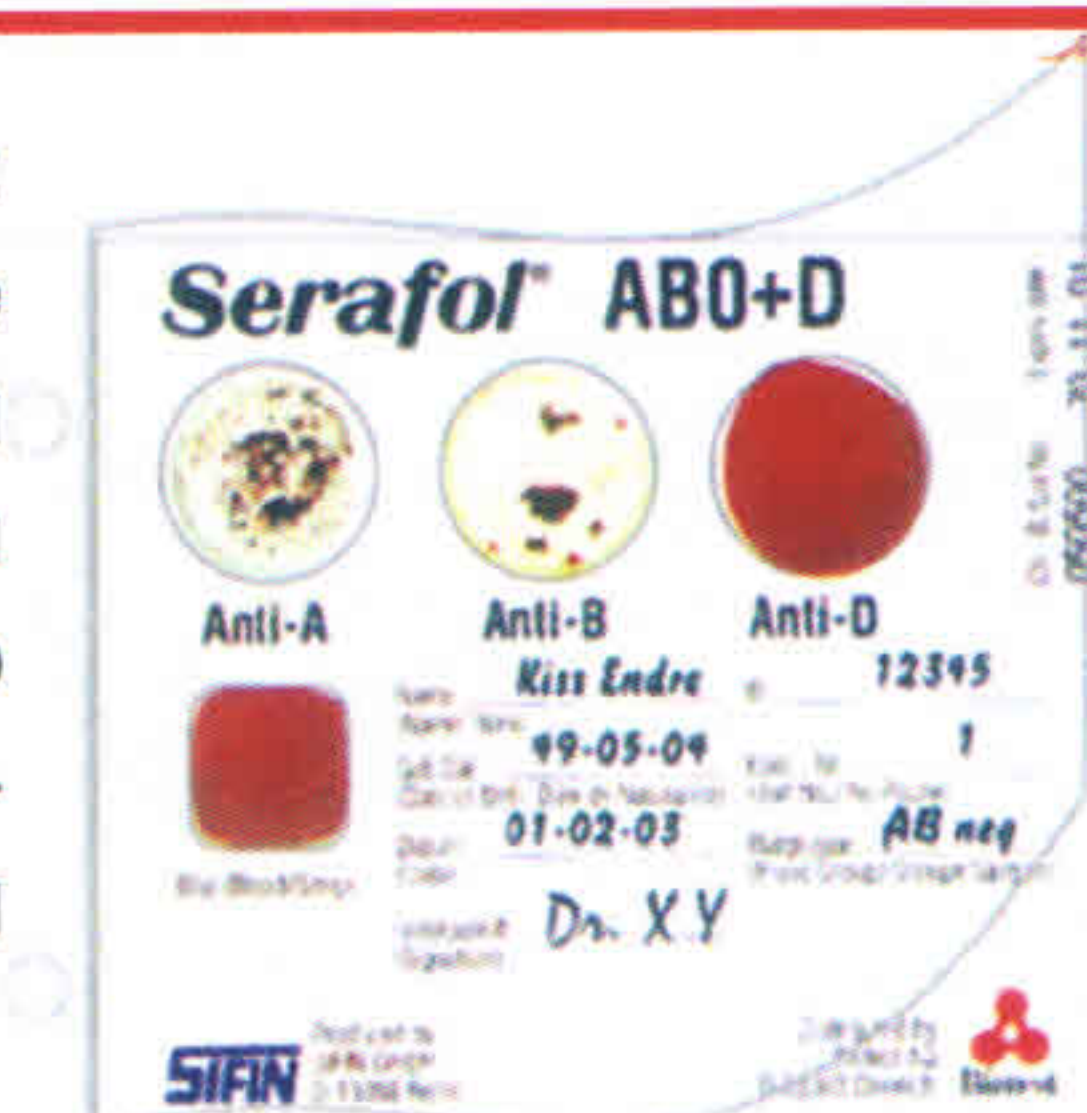

 **АСТИКО ИНТЕР**

ООО «Астико Интер»
Пр. Победителей 103, офис 508,
г. Минск, Республика Беларусь
тел.: (017) 308 74 78, факс (017) 308 74 79
email: info@astico.by
www.astico.by